

1. Produktname


Touch Wabenpaneel - Wandmodell

2. Produktcode

26009477

3. Kurze Beschreibung

Entdecken Sie die Magie der Berührung mit diesem interaktiven Wandpaneel! Bewegen Sie Ihre Hand über die wabenförmigen Muster und erleben Sie ein faszinierendes Spiel aus bewegenden Lichtern und Farben. Dieses interaktive Paneel stimuliert die Sinne und verleiht jedem Raum eine künstlerische Note. Die nahtlose Kombination aus Berührung, Bewegung und lebendigen Farben schafft ein dynamisches visuelles Erlebnis an der Wand.

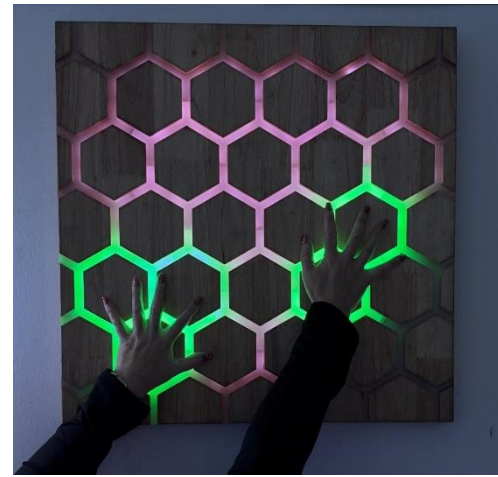

4 Sensorische Stimulation

Berührung und Sicht

5. Spezifikationen (technisch)

Abmessungen 59 x 59 x 3 cm

Nettogewicht: 6,4 kg

LED: 38 nicht ersetzbare mehrfarbige LEDs, 10W

Eingang: AC220-240V 50/60Hz

Ausgang: DC 5V 2A

6. Inhalt

1 x Panel Erforderlich: Bohrmaschine

1 x Adapter

1 x Schraubenschablone

1 x Montageset

7. Sicherheit

Diese Produkt darf nur unter direkter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen verwendet werden.

Sicherheitswarnungen:

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile vorhanden sind und keine Teile fehlen. Wenn Teile fehlen, versuche Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zusammenzubauen oder zu verwenden.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Produkt an das Stromnetz anzuschließen. Es funktioniert mit einem Adapter.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Adapter; kein anderer Adapter darf verwendet werden.



- Dieses Produkt enthält nicht ersetzbare LEDs. Wenn eine LED nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu öffnen, da dies zu weiteren Schäden führen könnte.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor der Installation. Verwenden Sie das Produkt nicht, solange es noch in der Verpackung ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Halten Sie es fern von Wärmequellen oder offenen Flammen.
- Nur für den Innenbereich verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Halten Sie es trocken.
- SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS, wenn es nicht in Gebrauch ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Kabel noch korrekt angeschlossen sind, ob das Gerät nicht beschädigt ist und ob es sicher montiert bleibt.
- **ZIEHEN SIE NICHT AM PANEL.**

Anweisungen :

1. Packen Sie das Produkt vorsichtig aus, nehmen Sie den Inhalt heraus und legen Sie ihn auf ein Karton oder eine andere schützende Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle aufgelisteten Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Es wird empfohlen, das Panel an einer Wand zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die gewählte Wand geeignet ist und das Gewicht des Panels tragen kann. Verwenden Sie je nach Wandtyp geeignete Befestigungen. Achten Sie darauf, dass eine Steckdose in Reichweite ist, ohne das Kabel zu überlasten.
3. Eine Schablone zum Markieren der Schraubenlöcher wird mitgeliefert, die dem Schraubenmuster des Panels entspricht. Befestigen Sie sie an der gewünschten Wand und verwenden Sie sie als Referenz, um die Löcher zu bohren. Setzen Sie dann die Dübel und Schrauben ein.
4. Hängen Sie das Panel an die Wand. Stecken Sie den Stecker des Adapters in den DC-Anschluss an der Seite des Panels. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
5. Berühren Sie das Vorderteil des Geräts, um es einzuschalten.