



1. Produktname:

Nenko Bisonyl - PVC

2. Kurzbeschreibung

Bisonyl ist urinbeständig, feuerhemmend und phthalatfrei.

3. Farbe

Farbmöglichkeiten wie am Farbekarte

4. Möbelreinigungsanleitung mit Bisonyl:

Verwenden Sie eine weiche Bürste, um losen Staub/Schmutz zu entfernen

- Mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. Lux-Seifenflocken in einer lauwarmen Lösung) auf einen Schwamm oder ein feuchtes Tuch auftragen.
- Dies kann mit einer sehr schwachen Lösung der Milton-Flüssigkeit desinfiziert werden.
- Verwenden Sie nicht zu viel Wasser und achten Sie darauf, dass das PVC nach der Reinigung immer trocken ist.
- Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm.
- Verwenden Sie kein kochendes/sehr heißes Wasser, Spülmittel/aggressives Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da sich die Beschichtung dadurch verfärbt und aushärtet.
- Eine Dampfreinigung wird nicht empfohlen.

Das Bisonyl sollte daher nur mit einem milden Reinigungsmittel behandelt werden, bei hartnäckigeren Verschmutzungen haben wir unsere Bisonylreiniger dafür, diese können über unsere Website bestellt werden:

[Reinigungs-Set für Bisonyl 100ml kaufen? - Nenko](#)

[Reinigungs-Set für Bisonyl 200 ml kaufen? - Nenko](#)

[Reinigungs-Set für Bisonyl kaufen? - Nenko](#)

Bitte beachten Sie, dass Marker, Stift, Tinte und Trennstoffe in Kleidung (z. B. bei frisch gefärbten Jeans) usw. nicht entfernt werden können, dies ist Tinte, die in die Beschichtung des Stoffes zieht und nicht entfernt werden kann.





5. Sicherheit

- Entfernen Sie alle Verpackungen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Klienten auf oder entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst. Plastiktüten und -verpackungen können für Kinder und gefährdete Personen gefährlich sein.
- Dieses Produkt enthält eine Schaumstofffüllung. Der Reißverschluss ist ebenfalls vernäht und wird nach Möglichkeit durch eine Stoffklappe verdeckt. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob der Reißverschluss nicht leicht zugänglich ist. Versuchen Sie nicht, auf das Innere dieses Produkts zuzugreifen. Erlauben Sie niemals Kindern oder schutzbedürftigen Personen den Zugang zum Inneren dieses Produkts.
- Sollten Nähte oder der Reißverschluss beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Nenko.
- Von Wärmequellen und Feuer fernhalten. Die weiche Polsterung von NENKO besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Bisonyl -PVC (Vinyl) mit hochwertigem, feuerhemmendem Weichschaum. Die weiche Dämpfung von Nenko erfüllt alle europäischen Brandschutznormen für den kombinierten Einsatz von Vinyl und Schaumstoff.

Bitte beachten Sie bei allen Materialien Folgendes:

- Überwachen Sie immer die Verwendung dieser Produkte.
- Erstellen Sie regelmäßig einen Reinigungsplan.
- Vinyl bricht, reißt und reibt ab, wenn es scharfen Gegenständen ausgesetzt ist oder ständig von harten Gegenständen gerieben wird. Ziehen Sie die Schuhe aus und vermeiden Sie Schnallen, Reißverschlüsse oder scharfe/harte/spitze Gegenstände, die mit der Oberfläche in Berührung kommen.
- Überprüfen Sie die Nähte regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie nicht abgenutzt oder gespalten sind und dass die Innenfüllung nicht zugänglich ist.
- Wischen Sie versehentliche Flecken/Flüssigkeiten ab, sobald sie auftreten oder bemerkt werden.
- Heben Sie, wenn möglich, von Zeit zu Zeit Bodenkissen an oder verschieben Sie Möbel, um alle Oberflächen und den Boden darunter zu reinigen.
- Vermeiden Sie es, während der Verwendung dieser Produkte zu essen und zu trinken.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer aufstellen, die die Oberfläche beschädigen können.
- Direkter Kontakt mit hellem Sonnenlicht kann das Material im Laufe der Zeit beeinträchtigen.
- Tränken Sie das Material nicht mit viel Wasser.
- Einige unserer Produkte enthalten nur Reißverschlüsse für Produktionszwecke. Versuchen Sie nicht, es zu öffnen oder auf das Innere dieser Produkte zuzugreifen. Erlauben Sie niemals Kindern oder gefährdeten Personen den Zugang zum inneren Teil dieses Produkts.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.nenko.de